

Agua Marina

Higiene nasal diaria

Fuerza 0

Presentación:

Producto sanitario

Código de producto	Presentación / Cantidad	N.º de unidades / caja individual
NAM	Spray con 100 ml de solución salina isotónica	1

Composición:

Agua marina: 30 ml/100 ml aproximadamente. Agua purificada c.s.: 100 ml.

Beneficios clínicos:

- Normomar es un producto natural, sin conservantes, que puede utilizarse durante períodos prolongados.
- Normomar es 100 % natural: se trata de una solución salina isotónica* que proporciona los beneficios conocidos de las sales minerales de agua marina, así como oligoelementos: cobre, hierro, manganeso, selenio, zinc, etc.
- *Solución isotónica: solución que contiene la misma concentración de sal que el cuerpo humano.

Características de funcionamiento:

- Gracias a su tecnología de microgota y a los beneficios de los oligoelementos marinos, Normomar permite una limpieza suave y descongestiona la nariz.
- Induce la necesidad de sonarse la nariz y lo facilita.
- Restablece la hidratación natural de la nariz (combate los efectos del aire acondicionado y la calefacción).
- Prepara y permite la acción de tratamientos nasales específicos y mejora su eficacia.

Indicaciones:

- Normomar es un producto sanitario indicado para **bebés recién nacidos, niños y adultos**:
- Higiene nasal diaria.
- **Elimina la mucosidad nasal en narices congestionadas y taponadas.**

Contraindicaciones:

- No usar en caso de que la nariz se encuentre totalmente taponada.
- No ingerir.

Modo de empleo:

Normomar puede utilizarse en todas las posiciones.

Su exclusivo pulverizador está específicamente diseñado para adaptarse a la nariz tanto de recién nacidos como de adultos:

1. Utilizar este producto como irrigador nasal siempre que sea necesario.
2. Introducir el pulverizador en un orificio nasal con suavidad.
3. Presionar un instante la boquilla. En caso de tener la nariz congestionada o taponada, presionar el pulverizador durante unos segundos.
4. Permitir la salida del exceso de solución, ya que también arrastrará la mucosidad.
5. Repetir el proceso en el otro orificio nasal.
6. Limpiar el pulverizador tras cada aplicación con agua y jabón, aclarar y secar.

Precauciones de uso:

- **No aplicar cuando los niños estén recostados para evitar que el líquido se desvíe a la garganta.**
- **No bloquear ni ocluir por completo el conducto nasal durante la aplicación para evitar presión en la nariz y oídos.**
- **Si los síntomas persisten o empeoran, o en caso de que no se produzca mejoría tras haber intentado despejar la nariz; si la secreción continúa siendo espesa y amarilla o verde, o si se presentan otros síntomas de enfermedad como fiebre o infección de oídos, consultar a un profesional sanitario.**

Precauciones adicionales:

Este producto no debe usarse tras una cirugía nasal, a menos que se lo indique un médico.

De uso exclusivo por un único paciente; el empleo de este producto por varios pacientes puede provocar infecciones.

- El spray con solución salina isotónica está destinado, exclusivamente, a su uso en la nariz. No pulverizar cerca de los ojos ni la boca.

•Conservación:

- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Temperatura: exponer a 35° C máximo.

Efectos adversos:

- Sensación de hormigueo transitoria cuando la mucosa nasal se encuentra muy irritada.

A advertencias:

- El producto está destinado, exclusivamente, al uso externo; la ingesta de la solución puede producir problemas estomacales.
- En pacientes con discapacidad mental, estos productos solo deben emplearse bajo la supervisión de una persona mentalmente sana.
- No utilizar el producto si el envase está dañado.
- Estos productos no deben usarse después de la fecha de caducidad.
- Estos productos deben mantenerse fuera del alcance de los niños y mascotas. La entrada en la nariz de pelos o suciedad de mascotas puede causar infección de nariz/oído. Asimismo, la ingesta de pelos y suciedad de mascotas produce enfermedades graves.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas o superficies calientes.
- Envase a presión. No perforar ni quemar, ni siquiera después de usado.
- No exponer a temperaturas superiores a 50° C.

Acondicionamiento:

Spray con 100 ml de agua marina. Hasta 300 pulverizaciones, aproximadamente.

NOTA: Cualquier incidencia surgida en relación con productos de TAISSIS CONCEPT S.R.L. debe notificarse a TAISSIS CONCEPT S.R.L., así como a la autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario y/o paciente.



Última revisión: enero 2020

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	No utilizar si el envase está dañado		Símbolo de advertencia para desechar el envase en la basura
	Mantener protegido de la luz solar		Mantener a una temperatura máxima de 35°C
	Mantener seco		De conformidad con la Directiva 93/42/CEE
	Producto no estéril		

Situación regulatoria: Producto sanitario de Clase IIa según Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE

Distribuido por:
LABORATORIOS NORMON, S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Tres Cantos - Madrid (ESPAÑA)
www.normon.es

Taissis Concept SRL
Ion Ticaloiu Street no. 17
115400 Campulung, Arges, Romania
Tel: +40 248 512 830. Fax: +40 248 512 870
office@taissis.ro
Ed.388.00