

## ESPAÑOL

Estimado cliente,

Le agradecemos su confianza en un producto Teyder. Usted adquirió un producto de calidad y de alto nivel medicinal. Por favor, lea las instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su médico, su ortopedia especializada o con nuestro departamento de atención al cliente.

**Le deseamos una pronta recuperación con los productos Teyder.**

**CALIDAD Y NORMATIVA**

Todos nuestros productos han sido fabricados siguiendo los controles de calidad marcados por la Comunidad Económica Europea (CEE), siguiendo estrictamente la Normativa Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE; (RD. 1591/2009). Todos nuestros tejidos, y especialmente aquellos que están en contacto directo con la piel, son tejidos de calidad, naturales e hipoalergénicos.

**TALLAS**

Seleccionar la talla correcta es importante para garantizar el buen resultado de los productos. Tenga en cuenta los cuadros de medidas presentados en el envase del producto para garantizar que la elección de la talla es la correcta.

**ADVERTENCIAS**

Si experimenta dolores, hinchazón, cambios de sensibilidad, reacción cutánea o cualquier manifestación fuera de lo común mientras utiliza este producto, retírelo y consulte de inmediato con un profesional médico.

**INSTRUCCIONES DE LAVADO**

En caso de contener velcro, pegarlos antes de lavarlo. Lavar a mano con agua templada y jabón neutro. No utilizar lejía ni lavar en seco. Secar a temperatura ambiente, no exponer la prenda a ninguna fuente de calor (exposición directa al sol, radiador, estufas, plancha,...)

**INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN****A. 870FV-871FT FAJA**

870V- Abra la faja y sitúela alrededor del tronco a unos 3cm del pliegue del glúteo. Cierre la faja mediante la solapa de velcro ejerciendo la compresión deseada.

871FT- Introduzca la faja tubular por las extremidades superiores o inferiores hasta colocarla alrededor del tronco a unos 3cm del pliegue del glúteo.

**B. 872CD CODERA**

Introduzca el brazo afectado por la zona más ancha de la ortesis haciendo coincidir la marca anatómica con la articulación del codo.

**C. 875MÑ MUÑEQUERA**

Introduzca la mano afectada en la ortesis a la altura del pliegue de la articulación.

**D. 877HM HOMBRERA**

Introduzca la hombrera a través de los brazos como si fuera una camisa. Asegúrese de la correcta colocación de la prenda.

**E. 873RD RODILLERA**

Introduzca la extremidad afectada por la zona más ancha de la ortesis haciendo coincidir la marca de ventana rotuliana con la rótula.

**F. 874TB TOBILLERA**

Introduzca el pie afectado en la ortesis haciendo coincidir el talón con la marca anatómica.



## RECOMENDACIONES

Estos productos sólo deben ser usados bajo prescripción médica, puesto que su uso está condicionado a recomendaciones médicas.

Tenga en cuenta que el material es inflamable por lo que es importante que no exponga este producto a una situación que pueda producir su ignición. En caso que así fuera, quítese rápidamente el producto.

En caso de producirse alergias, rozaduras, irritación o hinchazón, retire el producto y consulte con el médico prescriptor o al técnico ortopédico.

No usar con cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento o acumulación de calor.

## GARANTÍAS

Teyder® ofrece garantía de sus productos siempre y cuando estos no hayan sido modificados ni alterados respecto al producto original, ni hayan sido alterados debido a un mal uso del producto, incumpliendo las recomendaciones de estas instrucciones. Si al adquirir el producto encuentra alguna anomalía en el mismo, diríjase al establecimiento donde lo adquirió para proceder inmediatamente al cambio.

Versión Mayo 2017