


## TECNOLOGÍA<sup>®</sup> *regenactiv*



*regenactiv*<sup>®</sup>

**VISCOSA CH**  
Hilado protector de origen marino, natural y biodegradable.

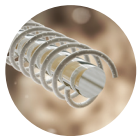

SILVER  
**BASE**  
LAYER

**POLIAMIDA ION**  
Hilado antibacteriano aditivado con partículas iónicas de plata.

La Máscara ITACA está elaborada con la novedosa Tecnología Regenactiv<sup>®</sup> (textil patentado) basada en la interacción de dos hilos tejidos entre sí. Un hilado principal, natural y biodegradable, de viscosa absorbente con partículas de quitina entrelazado con un segundo hilado de poliamida ionizada con plata sobre hilo de elastano.

Esta novedosa y exclusiva combinación, en contacto con la piel, ayuda a mantener la integridad de la barrera cutánea, conservando su estado fisiológico natural y favoreciendo su recuperación ante agresiones externas.


### BENEFICIOS EN EL CUIDADO DE LA PIEL

- Acción reepitelizante y regeneradora de la epidermis.
- Efecto antiinflamatorio y calmante.
- Efecto cicatrizante de pequeñas lesiones, así como de microheridas.
- Acción antimicrobiana duradera previniendo así el sobrecrecimiento de hongos y bacterias.

## MUVU TE RECOMIENDA



Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel hidroalcohólico

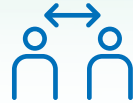

Mantener la distancia de seguridad entre otras personas mínima de 1,5 a 2m



En caso de no llevar protección, cubrirse la nariz y boca con el codo o un pañuelo de un solo uso al toser o estornudar



Evitar tocarse ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan la transmisión de enfermedades y virus

## CERTIFICADOS



### TALLA (ADULTO)

Edad 3-7

Edad 8-12

### COMPOSICIÓN

40% Viscosa CH  
45% Poliamida Ag  
15% Elastano

Licencia Sanitaria: 5947-PS



MLS TEXTILES 1992, S.L.  
NRI: 46/64675 - CIF: B46481644  
C/ Diablos, 34 Polígono Industrial El Pla  
46870 ONTINYENT · Valencia (Spain)



## MODELO ÍTACA KIDS



- Reutilizable/Lavable
- Evita la propagación del virus
- No irrita la piel

Powered by:  
*regenactiv*<sup>®</sup>

Licencia Sanitaria 5947-PS



Made in Spain

## CARACTERÍSTICAS

95

Eficacia de la filtración bacteriana  $\geq 95\%$ , según la norma EN14683:2019



Acelera el proceso de recuperación de la piel



Reutilizable



Reduce y evita la irritación dérmica



Acción antifúngica y antibacteriana (características testadas en más de 135 lavados)



Alta transpirabilidad



Control del exceso de humedad



Máximo confort y adaptabilidad



Tejido suave y agradable al tacto

## CONSIDERACIONES DE USO

- **Población general:**  
El uso de la máscara Ítaca reduce y evita la propagación del virus.
- **Uso profesional (sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc)**  
**Uso complementario a otros equipos de protección individual:**
  - Evita el contacto directo de mascarillas u distintos tipos de protección, previniendo lesiones y alteraciones cutáneas.
  - Recupera la piel en caso de pérdida de integridad cutánea.
- **Antes de su utilización:**  
Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico
- **Modo de colocación:**  
Colócate la mascarilla evitando el contacto con la parte central.  
  
Ajusta la banda por debajo de las orejas y la parte central por debajo de los ojos y barbilla, cubriendo totalmente nariz y boca.  
  
Evita tocarte la máscara durante su uso
- **Después de cada uso:**  
Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes de manipularla.  
  
Retírate la máscara por detrás sin tocar la parte central.  
  
Lava la máscara a una temperatura máxima de 60°C a mano o a máquina.\*  
  
Lávate de nuevo las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

\* Se puede esterilizar en autoclave vapor presión a 121°C

## PRODUCTOS MUVU

### CUIDADO DEL PIE



### CUIDADO DEL CUERPO



### CUIDADO CAPILAR

