



*Alivio de la sequedad ocular con
acción reparadora y protectora*

► Solución estéril de uso oftalmológico y pH fisiológico, con hialuronato de sodio y aguas destiladas de ginkgo biloba, arándanos, hinojo y centella. La solución se presenta en un práctico envase multidosis de 10 ml, sin conservantes, con sistema de autocierre.

El hialuronato confiere al producto propiedades mucomiméticas y viscoelásticas, que aseguran una lubricación adecuada de la superficie ocular, protegiéndola de la fricción causada por los movimientos del ojo. Este polímero es también capaz de retener agua e interactuar al mismo tiempo con el epitelio ocular. Por esta razón, la solución mantiene húmeda la superficie ocular y aumenta la estabilidad de la película lagrimal precorneal que protege la superficie de los agentes medioambientales.

En la formulación del producto, el agua destilada de ginkgo biloba mejora la agudeza visual a larga distancia, alivia la fatiga y el enrojecimiento del ojo y de la membrana mucosa ocular. El agua destilada de ginkgo biloba se usa junto con el agua destilada de centella, debido a su acción coadyuvante en la reducción de los procesos irritativos.

En el contexto de la formulación del producto, el agua destilada de arándanos se usa por sus propiedades refrescantes: produce alivio de la fatiga ocular y actúa como protector de la mucosa ocular contra los agentes atmosféricos y los factores medioambientales.

El agua destilada de hinojo es usada comúnmente en enfermedades oculares para aliviar la sensación de quemazón, y junto al agua destilada de arándanos, se usa por su acción reparadora. Los componentes vegetales usados en la formulación en forma de aguas destiladas, ejercen una acción de alivio, refrescante y protectora.

La fórmula contiene también cloruro de sodio y dos agentes tampón (ácido bórico y tetraborato de sodio decahidratado) para garantizar una solución fisiológica.

Por tanto, las gotas oculares Optiben ojos secos Repair poseen una acción humectante y lubricante sobre la superficie ocular, y producen un alivio temporal de la sensación de quemazón, la irritación y las molestias debidas a la sequedad del ojo. Las gotas oculares pueden usarse como protección contra la irritación.

Las gotas oculares Optiben ojos secos Repair son apropiadas para usuarios de lentes de contacto sin necesidad de quitárselas.

► Indicaciones

Gotas de acción reparadora y protectora, indicadas para refrescar, aliviar y lubricar los ojos con sequedad o en casos de irritación del ojo o de la mucosa ocular debidos a:

- factores medioambientales (aire acondicionado, exposición excesiva a la radiación solar, el viento, el humo o la contaminación).
- sequedad del ojo debida a fatiga excesiva causada por el trabajo prolongado ante el ordenador, la lectura intensiva o el síndrome del ojo seco.
- estrés oftálmico subsecuente a la cirugía de la superficie ocular.
- uso de lentes de contacto durante muchas horas al día.

► Instrucciones de uso

Adecuadas para su uso con lentes de contacto.

- Abrir el cierre de seguridad antes del primer uso y retirar la tapa de protección.
- Deposite 1-2 gotas en cada ojo.
- Debido a las características intrínsecas de la botella con dispensador para soluciones sin conservantes, el vaciado progresivo de la botella puede requerir una mayor presión para permitir la salida de producto.
- Tras el uso, cierre inmediatamente el envase: su contenido deberá usarse en los siguientes 6 meses tras su apertura.
- Las gotas están indicadas también para su uso frecuente varias veces al día, según sus necesidades o por indicación de su médico.

► Composición

Hialuronato de sodio, agua destilada de ginkgo biloba, agua destilada de arándano, agua destilada de hinojo, agua destilada de centella asiática, ácido bórico, tetraborato sódico, cloruro sódico y agua para preparaciones inyectables.
Sin conservantes.

► Advertencias y precauciones

- El producto está destinado al uso exclusivamente oftalmológico.
- El producto está destinado a su uso por un solo paciente por ampolla.
- Antes de usarlo, compruebe que el envase de un solo uso no está dañado.
- Al aplicarlo, no toque el párpado ni la superficie del ojo con la punta del envase.
- No usar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.
- En caso de producirse efectos indeseados durante el uso, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

► Efectos secundarios

Hasta la fecha no se ha informado de ningún efecto secundario del producto.

► Embalaje

10 ml multidosis, sin conservantes, con sistema de autocierre.

► Condiciones de almacenamiento

No almacenar por encima de los 30°C.

Una vez abierto el envase multidosis, su contenido deberá usarse en los siguientes 6 meses tras su apertura.

► Caducidad

Para producto sin abrir: 36 meses desde la fecha de producción

No exceder la fecha de caducidad mencionada en la caja y en la botella multidosis.



COC Farmaceutici s.r.l. - Via Modena, 15-40019 - Sant'Agata Bolognese (Bo), Italia.

► Distribuido por:

LABORATORIOS CINFA S.A.

Olaz-Chipi, 10. Polígono Industrial Areta.
31620 Huarte (Navarra) ESPAÑA.



PRODUCTO
SANITARIO

► Fecha de la última revisión: 03.02 de 11/2019

